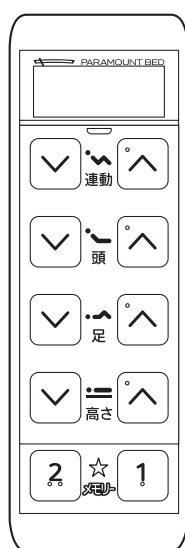



オプション用手元スイッチ

(ActiveSleepシリーズ RA-C1/C2モデル・
INTIME1000シリーズベッド専用)

RC-1021

3
モーター

RC-1821

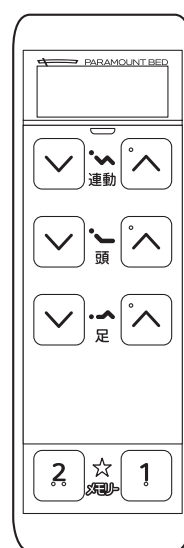1+1
モーター

このたびは、オプション用手元スイッチ（以下、手元スイッチ）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この「取扱説明書」には、手元スイッチを安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。

- 手元スイッチをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」およびActiveSleepシリーズ RA-C1/C2モデル・INTIME1000シリーズの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- お手持ちのActiveSleepシリーズ RA-C1/C2モデル・INTIME1000シリーズの取扱説明書と本取扱説明書を一緒に保管してご使用ください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除き、この「取扱説明書」では表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。
- この製品は日本国内専用です。海外では電源電圧が異なるため使用できません。


7F13075300A2

■この製品をベッドに取り付けることで、手元スイッチを使用してベッドを操作できます。（一部の機能を除く。）

こんなことができます

ベッドの情報を画面表示

- 手元スイッチの表示パネルにベッドの状態（背の角度など）が表示されます。
ベッドの調節時に角度や高さが一目でわかります。
- 操作ボタンの突起により、触感で  /  を区別できます。

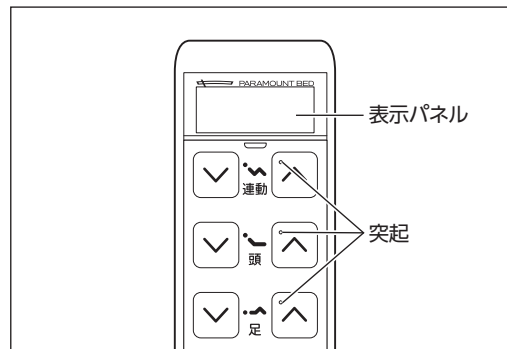

「安全上の注意」を必ずお読みください。（ 2～3ページ）

もくじ

1 安全上の注意	2・3
2 手元スイッチの使用方法	4
1. 手元スイッチの各部の名称と働き	4・5
2. 手元スイッチの電源の入れかた	6
3. 背の動かし方	7～9
4. ベッドの高さ調節のしかた 	10
5. 膝の動かし方	11
6. メモリーポジションへの動かし方	12
3 手元スイッチによるベッドの設定のしかた	13
1. 設定モードへの切り換え	13
2. ベッドの各動作設定	14
3. 操作ボタンのロック（操作禁止）の設定	15
4. メモリーポジションの設定	16
5. 設定のリセット	17
6. 手元スイッチの交換お知らせ表示	17
4 定期点検と日常のお手入れ	18
1. 定期点検について	18
2. 日常のお手入れについて	18
5 長期保管	18
6 故障かな？と思ったら	19・20
7 仕様	20
8 手元スイッチの取り付け・取り外し方法	21～23
9 取付後の点検	24・25
アフターサービス	26

この取扱説明書に記載されているマークについて



について

このマークは、特に重要な内容や間違いやすい内容、注意点などを記載していることを表しています。

頭側 足側



について

このマークは、ベッドの方向（頭側と足側）を表しています。

- ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度に応じて「警告」と「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。
- ※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・まひ麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

手元スイッチについて


弊社が指定する適合品を使用してください

- この手元スイッチは、ActiveSleepシリーズ RA-C1/C2モデル・INTIME1000シリーズベッド専用です。指定外の製品や他社製品と組み合わせると、思わぬけがや破損の原因となります。

操作が理解できないと思われる方（12歳以下のお子様や認知症の方など）に、操作させないでください

- 誤ってベッドに身体がはさまれるなど、思わぬけがをするおそれがあります。1人で手元スイッチに触れる可能性がある場合には、次のいずれかの方法により操作を制限し、誤操作による事故を未然に防いでください。
 - ・操作禁止ボタンで手元スイッチの操作ボタンをロック（操作禁止）する。（操作方法は  15ページ）
 - ・ベッドの電源プラグを抜く。

手元スイッチの取り扱いに注意してください

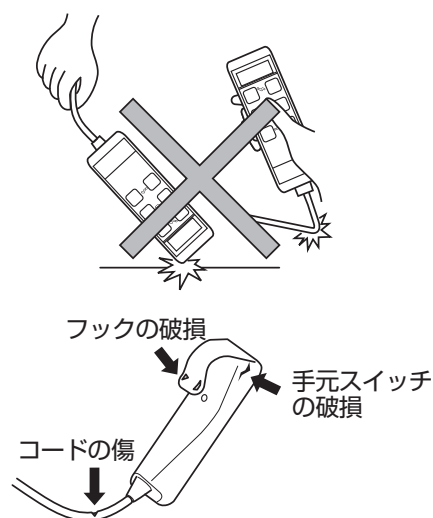

- ベッドが誤作動してけがをしたり、故障したりする原因となります。また、感電・火災のおそれがあります。
 - ・ぶつけたり傷をつけないでください。
 - ・落としたり、コードを無理に引っ張ったりしないでください。
- 傷んだ手元スイッチは、交換を依頼してください。



手元スイッチについて

手元スイッチに、水などをかけないでください

感電したり、故障したりする原因となります。誤って水などをかけてしまった場合は、ベッドの電源プラグをコンセントから抜き、パラテクノコールセンター（☎ 26ページ）までご連絡ください。

手元スイッチのコードに、足を引っ掛けしないでください

- コードが破損し、感電・火災のおそれがあります。
- 転倒して、けがをするおそれがあります。

点検・交換について

お客様による改造はしないでください

感電・火災の原因となったり、手元スイッチの動作異常で、けがをしたりするおそれがあります。

手元スイッチは定期的に点検してください

使用の頻度や環境により、製品は摩耗・劣化します。定期的に破損の有無などを点検してください。思わぬけがをするおそれがあります。

被災した手元スイッチは点検・交換を依頼してください

地震・火災・水害などで被災した手元スイッチを使用しないでください。感電・火災の原因となったり、手元スイッチの動作異常で、けがをしたりするおそれがあります。パラテクノコールセンター（☎ 26ページ）までご連絡ください。



スプレータイプの殺虫剤を、手元スイッチに直接噴射しないでください

殺虫剤に含まれる溶剤によって、手元スイッチが破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

手元スイッチ操作時は周囲を確認してください


ベッドが動作することで周囲のものを破損させたり、ベッドが破損・変形する原因となったりします。

2 手元スイッチの使用法

※手元スイッチに表示される数値（角度・高さ）は目安としてください。

1.手元スイッチの各部の名称と働き

操作ボタンと表示ランプ

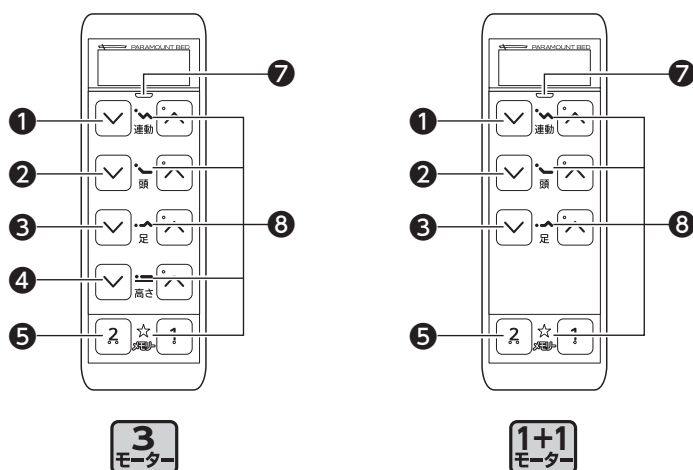

操作ボタン

①連動ボタン

「らくらくモーション」の調節

②頭ボタン

背ボトムの角度を調節

③足ボタン

膝ボトムの角度を調節

④高さボタン

ベッドの高さを調節

⑤メモリーボタン

あらかじめ設定したメモリーポジションに向かって、背ボトム・膝ボトムの角度、ベッドの高さを調節

操作ボタンについて




けい こく
警告

ベッドの動作を止めたい場合は手元スイッチの操作ボタンから手を離してください。ベッドの可動部ではさまれたり、圧迫されたりするなどして、けがをするおそれがあります。

- 操作ボタンを押すとベッドが動き、離すとその位置で止まります。また、同時に2つ以上のボタンを押した場合も止まります。



同時に2つ以上のボタンを押して止めた場合、再度操作をするときは一度すべてのボタンから手を離してください。

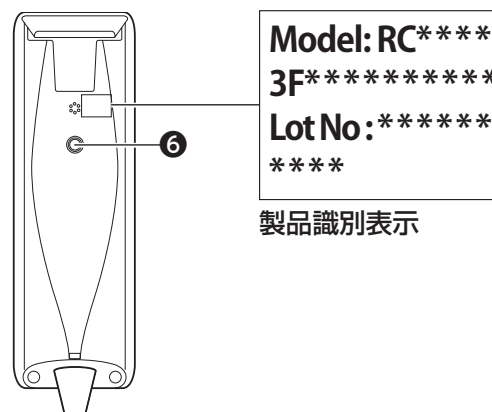

製品識別表示

設定ボタン

⑥設定ボタン

設定ボタンを押すと、操作ボタンで各種設定が変更できる

表示ランプ

⑦電源ランプ

ベッドの通電状態をお知らせ

点灯(緑)：正常な通電状態

消 灯：ベッドの電源プラグまたは手元スイッチプラグが外れているか、停電や断線などの場合

点滅(赤)：断線や障害物との接触などの異常を表示

「⑥ 故障かな?と思ったら」(C 19・20ページ)を参照して処置してください。

⑧操作選択ランプ

操作ボタンの「有効(操作可能)/ロック(操作禁止)」をお知らせ

点灯(白)：操作が可能な状態

消 灯：電源が「OFF」になっている。もしくは操作が禁止状態




操作選択ランプは一定時間操作がないと消灯します。手元スイッチを手につくなど揺れがあると自動で点灯します。

2 手元スイッチの使用法

機能選択スイッチ

手元スイッチ裏面の設定ボタンを押すと、操作ボタン（機能選択スイッチ）で各種設定が変更できます。

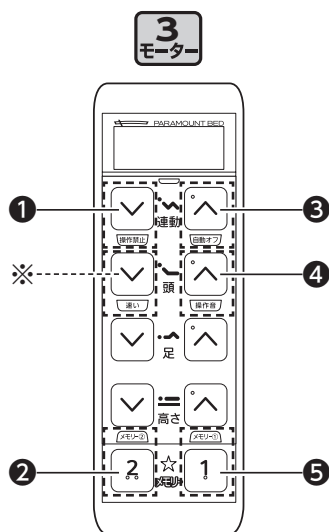

①操作禁止ボタン

[15ページ]


②メモリーボタン2

[16ページ]

③自動オフボタン

[14ページ]

※速さ切換ボタンは使用できません。

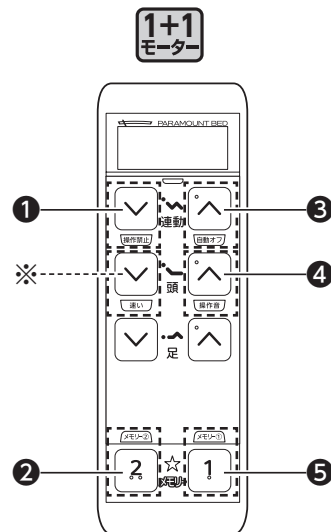

④操作音ボタン

[14ページ]

⑤メモリーボタン1

[16ページ]

表示パネル



①角度/高さ表示/エラーコード

動作中の背ボトム・膝ボトム角度またはボトム上面高さを数字で表示

※エラーが発生したとき、エラーコードを表示します。

背角度表示…0°～75°

膝角度表示…0°～30°


高さ表示……30cm～68cm

②操作禁止表示

押した操作ボタンがロック（操作禁止）に設定されているときに点滅

2.手元スイッチの電源の入れかた

自動オフ設定が「無効」の場合

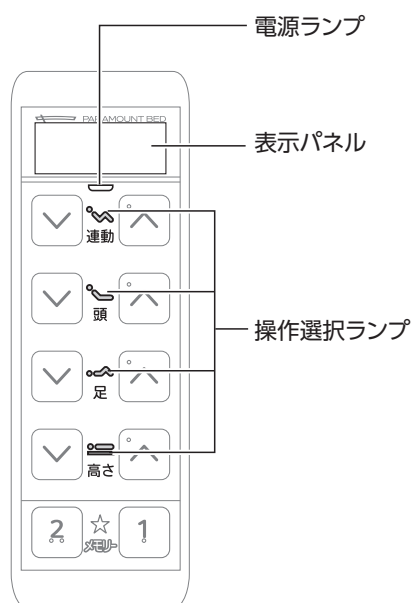

1 ベッドの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

手元スイッチの電源ランプが緑色に点灯し、ベッドの操作ができるようになります。

※6～17ページに記載の手元スイッチのイラストは **3 モーター** です。

自動オフ設定が「有効」の場合

1 ベッドの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

手元スイッチの電源ランプが、緑色に点灯します。

2 手元スイッチの操作ボタン (△/▽) のいずれかを押してください。

操作選択ランプが点灯し、ベッドを動作させる準備ができます。(電源ON状態)

※ボタンを押すと表示パネルに「On」と表示されます。



ベッドの電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは、手元スイッチの電源は「OFF」の状態です。ベッドの操作や設定を行う場合は、一度、操作ボタンを押して電源「ON」の状態にすると、行うことができます。

2 手元スイッチの使用方法

3. 背の動かしかた


背あげにはらくらくモーション（連動ボタン）と、背あげ（頭ボタン）の2種類があります。

2


らくらくモーション（連動ボタン）操作のしかた

連動ボタンでらくらくモーションによる「背あげ/背下げ」の操作をしてください。


※連動ボタンを押している間は、下記の動作を続けます。

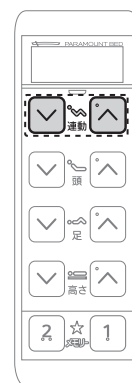


らくらくモーションによる背あげ操作 [連動あげボタン () を押す]

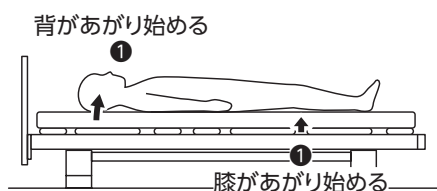


① 背と膝が同時にあがり始める。

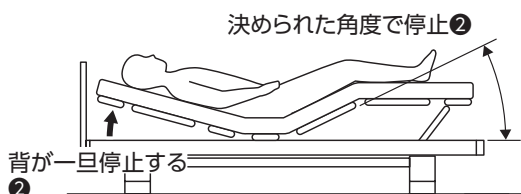

② 背が一旦停止し、膝が決められた角度まであがると停止する。
膝が停止後、背があがり始める。

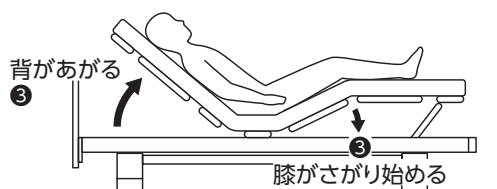

③ 背はそのままあがり、膝がさがり始める。

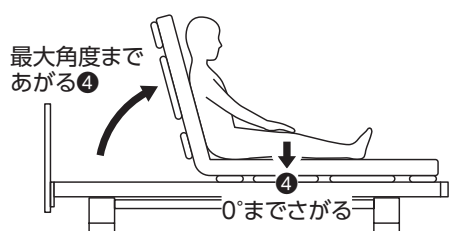


④ 背が最大角度になるタイミングで、膝が0°までさがる。


らくらくモーションによる背さげ操作 [連動さげボタン () を押す]




- ① 背がさがり始めるのとほぼ同時に、膝があがり始める。

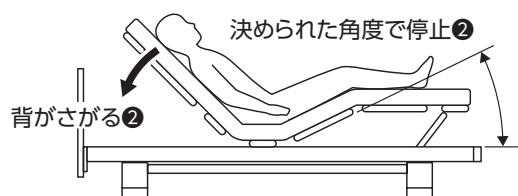

- ② 膝が決められた角度まであがると停止し、背はそのままさがる。

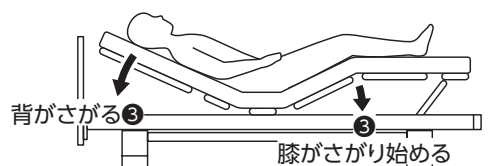

- ③ 背はそのままさがり、膝がさがり始める。

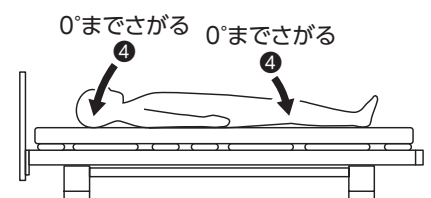

- ④ 背と膝が連動して、ほぼ同時に0°までさがる。

2 手元スイッチの使用法

2

手元スイッチの使用法


背あげ（頭ボタン）操作のしかた

頭ボタンで「背あげ（頭） / 背さげ（頭）」の操作をしてください。

※背ボトムの角度を0°～75°まで調節できます。


動作範囲

背あげ（頭）：0°～75°

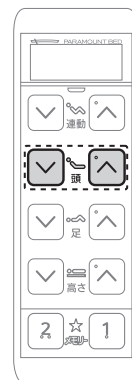

背あげ（頭）操作


【頭あげボタン（）を押す】

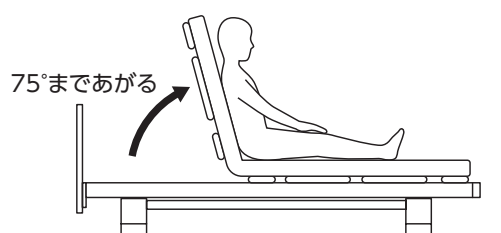

- 背が75°まであがる。
ボタンを離すと、背はその位置で止まる。

背さげ（頭）操作

【頭さげボタン（）を押す】

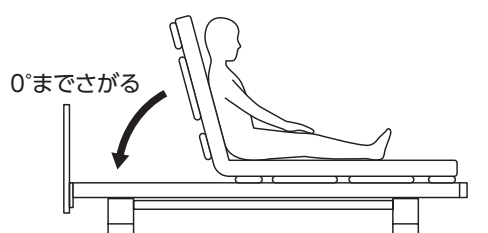


- 背が0°までさがる。
ボタンを離すと、背はその位置で止まる。

角度制限機能について

胸部や腹部にかかる圧迫感を軽減するため、背ボトムと膝ボトムとの間の角度が90°より小さくならないように自動的に動作します。



- 安全のため、角度制限機能は解除できません。
- 頭・足のボタン操作を禁止にしている場合でも、角度制限機能による自動動作で、背ボトム・膝ボトムは動きます。

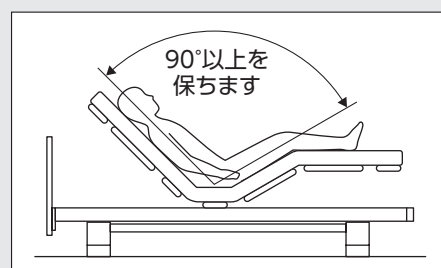

4. ベッドの高さ調節のしかた 3 モーター

動作範囲

高さ(高): 30cm～68cm
高さ(低): 23.5cm～61.5cm

高さボタンで「高さあげ/高ささげ」の操作をしてください。

※ゆかからベッドのボトム上面までの高さ(床高)を、30cm～68cm(23.5cm～61.5cm)まで調節できます。


※高さボタンを押している間は、下記の動作を続けます。

※()内の数字は、脚座を「低」に付替えた場合の高さです。



高さあげ操作


【高さあげボタン () を押す】

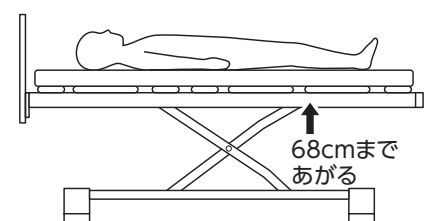


- 高さが68cmまであがる。
ボタンを離すと、ベッドはその高さで止まる。

高ささげ操作

【高ささげボタン () を押す】

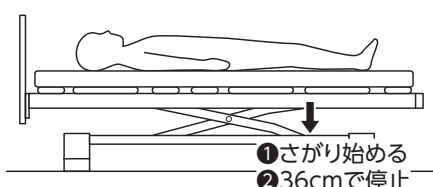

- ① ベッドがさがり始める。
ボタンを離すと、ベッドはその高さで停止する。
ボタンを押していても床高が36cmになると、「ピピッ」と鳴って一旦停止する。

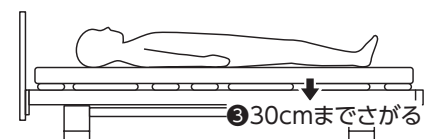

- ② ボタンを離し、再度高ささげボタン () を押すと「ピピッ」と警告音を鳴らしながら、高さが30cm(最低高さ)までさがる。
最低高さに近づくにつれて、警告音の鳴る間隔が短くなる。

一旦停止後のさげ動作について

- 床高36cm以下にさがる場合は、それまでの速度より低速でさがります。
- 床高36cm以下で使用しているベッドをさげる場合(低床動作)は、一旦停止せずに30cm(最低高さ)までさがります。



一旦停止時および低床動作中の警告音は、操作音スイッチで操作音「切」に設定しても消すことができません。

② 手元スイッチの使用方法

5. 膝の動かし方


動作範囲

膝あげ(足): 0°～30°

足ボタンで「膝あげ/膝さげ」の操作をしてください。


※膝ボトムの角度を0°～30°まで調節できます。

※足ボタンを押している間は、下記の動作を続けます。

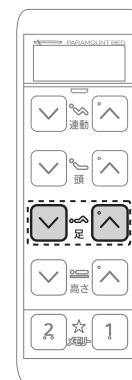

膝あげ操作


【足あげボタン（）を押す】

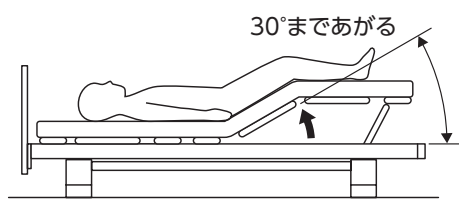

- 膝が30°まであがる。
ボタンを離すと、膝はその位置で止まる。

膝さげ操作

【足さげボタン（）を押す】

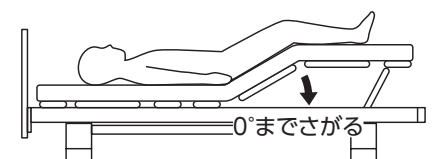

- 膝が0°までさがる。
ボタンを離すと、膝はその位置で止まる。

6.メモリーポジションへの動かし方

あらかじめ設定したメモリーポジションに向けて、ベッドの「背（頭）」・「足（膝）」、「高さ」を調節します。

※必要に応じてメモリーポジションを設定してください。

メモリーポジションにはあらかじめ初期設定が登録されています。（設定方法および初期設定は  16ページ）

メモリーボタンの操作をしてください。

※メモリーボタンを押している間は、メモリーポジションに向かって動作を続け、メモリーポジションになると停止します。

メモリーポジション1への操作

[メモリーボタン1 () を押す]

- ① メモリーポジション1に向けてベッドが動作する。
ボタンを離すと、ベッドはその位置で止まる。
- ② メモリーポジション1の位置になると、「ピピッ」と音が鳴り、ベッドが停止する。

メモリーポジション2への操作

[メモリーボタン2 () を押す]

- ① メモリーポジション2に向けてベッドが動作する。
ボタンを離すと、ベッドはその位置で止まる。
- ② メモリーポジション2の位置になると、「ピピッ」と音が鳴り、ベッドが停止する。

メモリーポジション動作中の一旦停止動作について

メモリーポジションを床高36cmより低く登録している場合、メモリーポジション動作中に床高が36cmになると「ピピッ」と鳴って一旦停止します。メモリーボタンから一度手を離し、再度押すと「ピピッ」と警告音を鳴らしながら、メモリーポジションまで動作します。

3 手元スイッチによるベッドの設定のしかた

■機能選択スイッチを操作することにより、ベッドの設定を変更できます。


警告

- 操作が理解できないと思われる方（12歳以下のお子様や認知症の方など）に操作させないでください。操作が理解できないと思われる方が、1人で手元スイッチを操作した場合、誤ってベッドに身体がはさまれるなど、思わぬけがをするおそれがあります。1人で手元スイッチに触れる可能性がある場合には、次のいずれかの方法により操作を制限し、誤操作による事故を未然に防いでください。
 - ・ 操作禁止ボタンで手元スイッチの操作ボタン（すべての操作ボタンまたは各動作部位の操作ボタン）をロック（操作禁止）する。（操作方法は 15 ページ参照）
 - ・ 電源プラグを抜く。
- 設定ボタンは、ベッド動作中に操作しないでください。意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

注意

設定ボタンを押すときは、鋭利なものを使用しないでください。破損の原因となります。

1. 設定モードへの切り換え

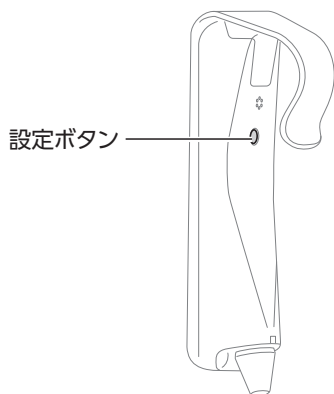


手元スイッチ裏面の設定ボタンを押すと、おもて面の設定選択ランプが点灯し、操作ボタンで各種設定ができるようになります。

設定変更が完了したら、再度、設定ボタンを押して、設定を確定してください。設定ボタンを押さないと変更した設定は確定されません。

警告


設定ボタンを一度押してから、20秒間ボタン操作が行われない場合は、設定は完了せずに元の設定に戻りますのでご注意ください。意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

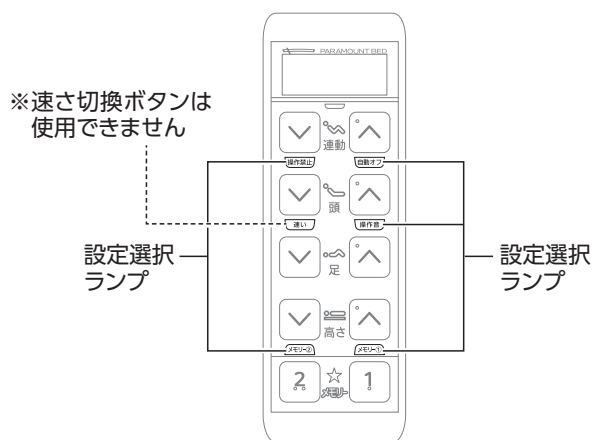

2.ベッドの各動作設定



設定モードへ切り換えてから、設定を変更してください。(P.13ページ)
各設定の状態によって、設定選択ランプの明るさが変わります。

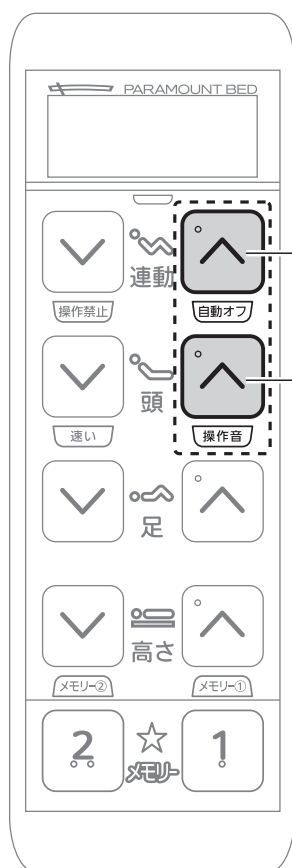

● 手元スイッチの無操作時の自動オフ設定

手元スイッチを60秒間操作しないと、手元スイッチを電源「OFF」の状態にすることができます。電源「OFF」の状態の場合、一度、操作ボタンを押して電源「ON」の状態にすることで、ベッドの操作や設定を行うことができますようになります。

※初期状態では、自動オフ設定は「無効」になっています。

※一度電源プラグを抜いても、設定は維持されます。

設定選択ランプの明るさ

暗 い:無効

明るい:有効

● 操作音の設定

手元スイッチの操作ボタンを押したときの操作音の「入/切」を切り換えます。

※初期状態では「入」になっています。

設定選択ランプの明るさ

暗 い:切

明るい:入



設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確定してください。設定ボタンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

3 手元スイッチによるベッドの設定のしかた

3.操作ボタンのロック（操作禁止）の設定






設定モードへ切り換えてから、設定を変更してください。
(P.13ページ)

手元スイッチの操作ボタンを使えなくすることができます。

※初期状態では、すべての操作が可能になっています。

設定のしかた

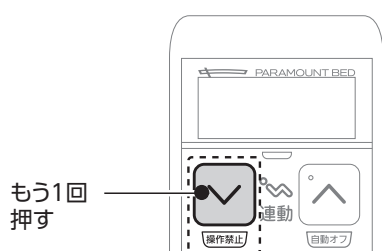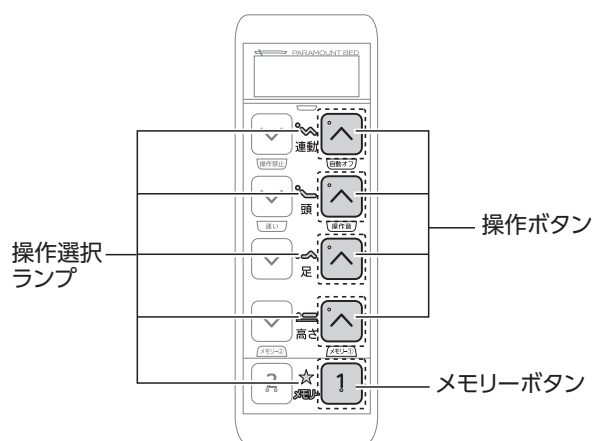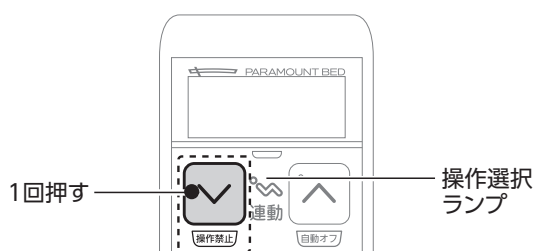

1 操作禁止ボタンを1回押してください。

ロック(操作禁止)されている操作ボタンの操作選択ランプは消灯、ロックされていない操作ボタンの操作選択ランプは点滅します。

2 操作禁止したい、または操作禁止を解除したい操作ボタンの $\uparrow$ ボタンを押してください。また、メモリーボタンを禁止にしたい場合はメモリーボタンの $\boxed{1}$ ボタンを押してください。

操作ボタンの操作選択ランプが切り換わります。

禁止したい：点滅→消灯

解除したい：消灯→点滅

3 操作禁止ボタンを、もう1回押してください。

操作選択ランプの点滅が消えて設定が完了します。


警告

- 頭・足・高さボタンを操作禁止にしても、連動ボタンやメモリーボタンにより、頭・足・高さが動作する場合があります。意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。必要に応じて、連動ボタンやメモリーボタンも操作禁止に設定してください。
- 設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確認してください。設定ボタンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

4. メモリーポジションの設定

メモリーボタンを使用し、ベッドのポジションを最大2個まで登録できます。

設定のしかた

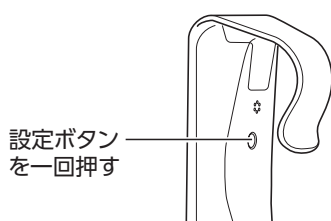

1 ボタン登録したいポジションまでベッドを動作させてください。

2 手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定モードにしてください。

3 ポジションを登録したいメモリーボタン
① / ② を押してください。

現在のベッドのポジションが仮登録されます。



初期設定に戻したい場合は、メモリーボタンを3秒以上長押ししてください。
初期設定のポジションが仮登録されます。

4 設定ボタンをもう一度押してください。

現在のベッドのポジションが登録され、設定が完了します。



メモリーポジションを再設定したい場合は、再度1～4を行ってください。

警告

- 設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確定してください。設定ボタンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。
- メモリーポジションの設定は、すべてのアクチュエーターのコネクターがコントロールボックスに差し込まれていることを確認してから行ってください。意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。



初期設定では、以下のポジションが登録されています。

※初期設定では、メモリーボタンを押しても、高さ調節動作はしません。

メモリーポジション1 **①** : 背 30° 膝 6° 高さ調節動作なし

メモリーポジション2 **②** : 背 0° 膝 0° 高さ調節動作なし

3 手元スイッチによるベッドの設定のしかた

5.設定のリセット

ベッドの操作設定を初期状態に戻します。

手元スイッチ表面のいずれかの操作ボタン2ヶ所と裏面の設定ボタンの計3個のボタンを同時に3秒以上長押しすると、ベッドの操作設定を初期状態に戻すことができます。

初期状態


項目	状態
操作禁止	ロック解除 (すべての操作が可能)
自動オフ	無効
操作音	入
メモリー①	初期値 (背30° 膝6° 高さ調節動作なし)
メモリー②	初期値 (背 0° 膝0° 高さ調節動作なし)



停電後や電源プラグ、手元スイッチプラグを抜いた場合も、機能選択スイッチで設定した内容は取り消されません。必要に応じて、設定のリセットをしてください。

6.手元スイッチの交換お知らせ表示

手元スイッチの交換時期をお知らせします。

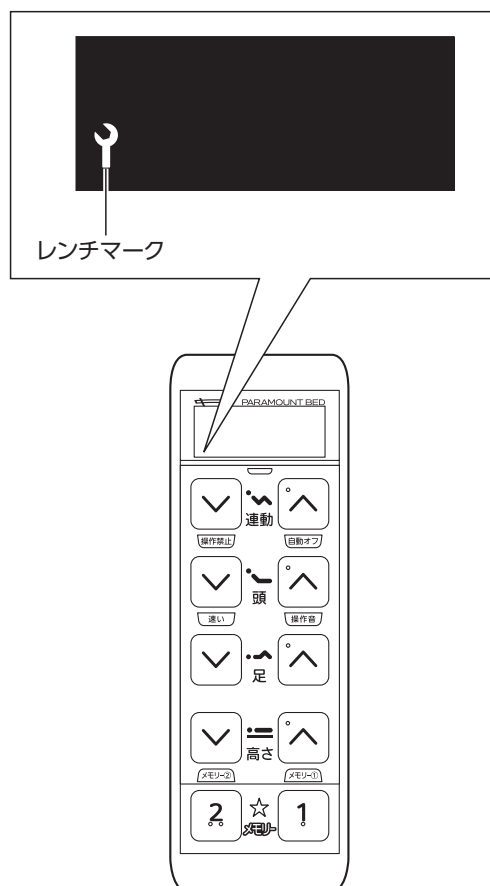

- 設定モードにした際、手元スイッチ上部の表示パネルにランチマークが点灯しているときは、手元スイッチの交換時期であることを示しています。お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンター (☎ 26ページ) までご連絡ください。

4 定期点検と日常のお手入れ

1. 定期点検について

手元スイッチを安全にご使用いただくために、1年に1回は定期的に点検してください。使用の頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。破損の有無などを点検してください。

- 点検項目は、「9 取付後の点検」(P.24・25ページ)をご覧ください。
- 異常が認められた場合や詳しい点検を希望される場合は、パラテクノコールセンター (P.26ページ) までお問い合わせください。

2. 日常のお手入れについて

手元スイッチを快適にご使用いただくためには、日常のお手入れが大切です。下記の要領で、手元スイッチを清潔にしてください。

警告

- お手入れするときは、ベッドの電源プラグをコンセントから抜いてください。誤操作により、はさまれてけがをするおそれがあります。
- 手元スイッチに水をかけて掃除しないでください。感電するおそれがあります。

手元スイッチのお手入れ

■ 汚れの落とし方

- ① 水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。
- ② 水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③ 乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■ 消毒のしかた

下記の消毒剤を、指定の濃度、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

消毒剤	指定の濃度
消毒用エタノール	76.9～81.4%
塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)	～0.2%
塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)	～0.2%
グルコン酸クロルヘキシジン (ヒビテンなど)	～0.05%
次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)	～0.05%



オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません

注意

- 揮発性のもの (シンナー、ベンジン、ガソリンなど) やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。



- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。

5 長期保管

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。温度-10～50℃、湿度30～90% RHの環境で保管してください。
- 取扱説明書を紛失しないよう、大切に保管してください。

6 故障かな？と思ったら

- 故障でない場合がありますので、交換を依頼される前にもう一度、以下の項目をチェックしてください。
- チェック・処置をしても正常に動作しない場合は、ただちにベッドの使用を中止し、ベッドの電源プラグをコンセントから抜いて、パラテクノコールセンター（☎ 26ページ）まで交換をご依頼ください。
交換のご依頼やお問い合わせのときは、製品識別表示（☎ 4ページ）に表示された番号もあわせてご連絡ください。
- 以下の症状により、電動で背さげをできない場合は、ActiveSleepシリーズ RA-C1/C2モデル・INTIME1000シリーズの取扱説明書に従って、手動またはスマートハンドルで背さげを行ってください。
- 故障や一時的異常の場合は、表示パネルにエラーコードが表示されることがあります。エラーコードを確認してください。



地震・火災・水害などで被災したベッドは、パラテクノコールセンター（☎ 26ページ）まで点検・交換をご依頼ください。感電・火災の原因となったり、ベッドの動作異常で、けがをしたりするおそれがあります。



状態 (症状)	手元スイッチの電源ランプ	手元スイッチのエラーコード	チェック	処 置	参照ページ
操作ボタンを押してもベッドが動作しない	消灯	—	ベッドの電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？	ベッドの電源プラグをコンセントに差し込んでください。	—
		—	ベッドの電源プラグはコンセントに差し込んでいるが、手元スイッチの電源ランプが消えていませんか？	コンセントに他の電気機器を接続して、電気がきていることを確認してください。	—
	緑で点灯	—	押した操作ボタンの操作選択ランプが消えていませんか？	操作禁止ボタンを操作して、操作ボタンを有効（操作可能）にしてください。	15
		—	手元スイッチの電源が「OFF」になっていませんか？	一度操作ボタンを押すことで、電源が「ON」になります。もう一度、操作ボタンを押してください。	6
	常時、赤で速い点滅 (0.2秒ごと)	H1～H9	—	一度ベッドの電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差し直してください。	—
	ボタンを押したときだけ赤で遅い点滅 (1秒ごと)	U0	操作ボタンを押したまま、ベッドの電源プラグをコンセントに差し込みませんでしたか？	押されている操作ボタンを離してください。	—
		U1	可動部分に障害物はありませんか？	障害物を取り除いてから操作を行ってください。	—
		U2	手元スイッチのコネクターが抜けかけていませんか？	手元スイッチのコネクターを抜いて、差し直してください。	21
			ベッド上で電子治療器などを使用していませんか？	通信状態の異常を知らせる保護機能が働いたと思われます。故障ではありません。電子治療器などを使用するときは、ベッドの電源プラグを抜いてから使用してください。	—
		U3	—	一度ベッドの電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差し直してください。	—

状態 (症状)	手元スイッチの電源ランプ	手元スイッチのエラーコード	チェック	処 置	参照ページ
操作ボタンを押してもベッドが動作しない	ボタンを押したときだけ赤で遅い点滅 (1秒ごと)	U4	連続運転しましたか? (アクチュエーターを連続運転すると、運転時間制限が働き、動作が停止することがあります)	20～57分間放置してください。(放置せずに操作すると、再度エラーコードが表示されます)	—
		U5	—	一度ベッドの電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差し直してください。	—
			ベッドのアクチュエーターのコネクターが外れていませんか?	ベッドのアクチュエーターのコネクターを差し直してください。	—
		U6	—	一度電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差し直してください。	—
			新品の乾電池を接続していますか? (停電時のみ)	新しいアルカリ乾電池を接続してください。	—
		U9	動作が停止した状態で、長い間 (30秒以上) ボタンを押し続けていませんか?	ボタンを離してから再度操作してください。	—
			—	一度ベッドの電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差し直してください。	—
	消灯	—	手元スイッチのコネクターがベッドのコントロールボックスから抜けていませんか?	手元スイッチのコネクターをベッドのコントロールボックスに差し込んでください。	21
操作したボタンと異なる部位が動作する	緑で点灯	—	頭 (足) の  ボタンを押したときに膝 (背) がさがりましたか?	角度制限機能が働いているためで、故障ではありません。	—
			ベッドのアクチュエーターが正しく配線されていますか?	ベッドのアクチュエーターのコネクターを外し、正しく配線してから操作をしてください。	—

7 仕様

品番		RC-1021	RC-1821
寸法	全長	17cm	
	全幅	5.6cm	
	全高	5.6cm (フック含む)	
製品質量		0.2kg	
コード長さ		2.3m	
主な材質		ASA	
動作保証条件	温度	10～40℃	
	湿度	30～75%RH	
消費電力		1W 以下	
適合品		ActiveSleep シリーズ RA-C1/C2 モデル・INTIME1000 シリーズ (RA-C13●□△、RA-C1C●□△、 RA-C23●□△、RA-C2C●□△、 RQ-■13●□△)	ActiveSleep シリーズ RA-C1/C2 モデル・INTIME1000 シリーズ (RA-C11●□△、RA-C1A●□△、 RA-C21●□△、RA-C2A●□△、 RQ-■11●□△)


※品番の記号には右記の内容が入ります。■：A、B □：S、R、C △：A～D ●：3～8

8 手元スイッチの取り付け・取り外し方法

梱包部品の確認

■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、最寄りの直営店または支店(☎ 26 ページ)までご連絡ください。


RC-1021/RC-1821
0.2kg (0.35kg)

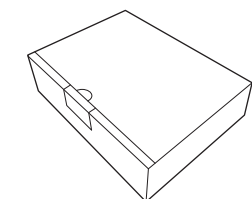

22×16.5×7 (cm)

手元スイッチ ×1



取扱説明書 ×1

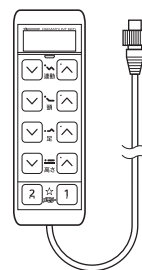

8

手元スイッチの取り付け・取り外し方法

8-1.手元スイッチの付け替え (Aタイプ手元スイッチの場合)

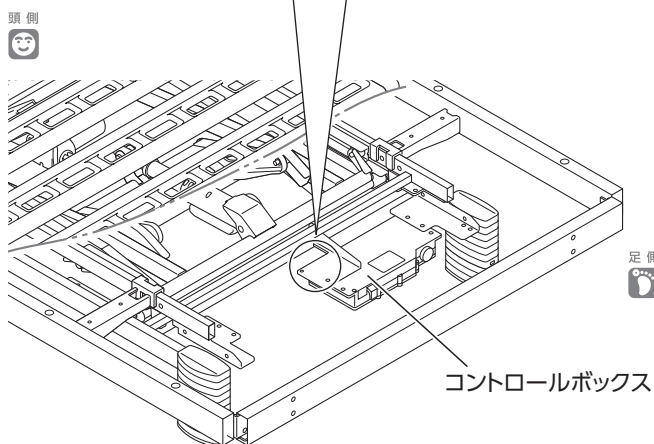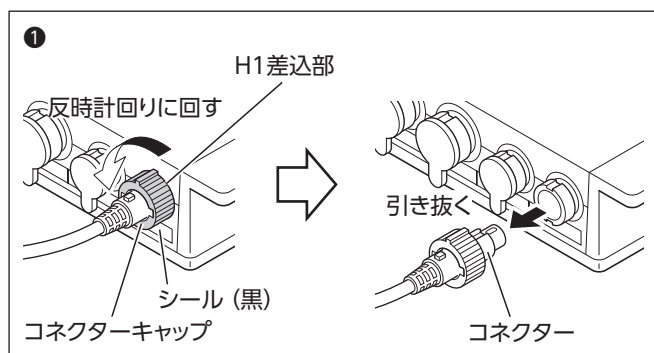


① ベッドの電源プラグをコンセントから抜き、Aタイプ手元スイッチのコネクターキャップを反時計回りに回して、コントロールボックスのH1差込部（シール：黒）からコネクターを引き抜いてください。


② クリップをベッド本体から取り外し（2ヶ所）、ActiveSleepシリーズ RA-C1/C2モデル・INTIME1000シリーズの取扱説明書に従って、ベッド本体から手元スイッチホルダーを取り外してください。

※ 手元スイッチホルダーは、オプション用手元スイッチとは併用できません。

②クリップの位置

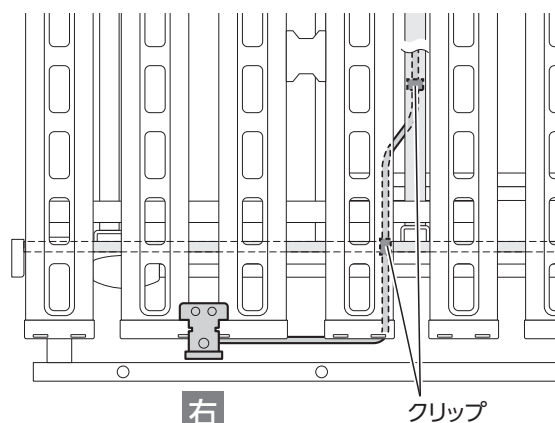


※図は右側に取り付けている場合です。左側の場合は左右逆の位置にクリップが付いています。

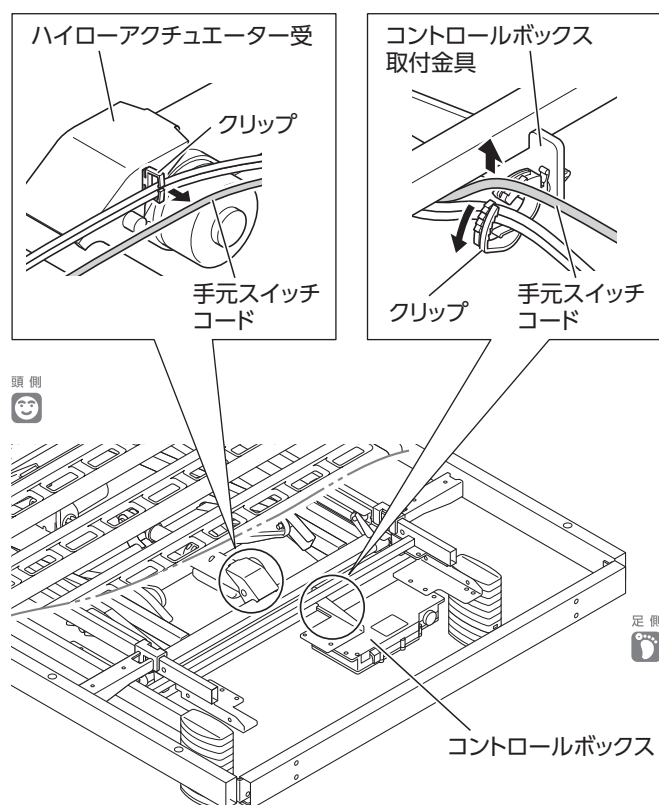

③ ハイローアクチュエーター受の横に付いているクリップから手元スイッチのコードを外してください。
(**3** モデルのみ)

④ コントロールボックス取付金具に付いているクリップから手元スイッチのコードを外してください。

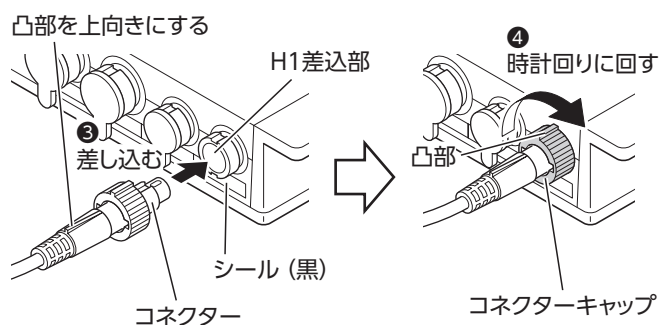

⑤ 手元スイッチコードのコネクタの凸部を上向きにし、コントロールボックスのH1差込部（シール：黒）に差し込んでください。

⑥ コネクタキャップの凸部が真上にくるように、時計回りに回してください。「カチッ」と音がして固定されます。

※ Aタイプ手元スイッチに戻す場合は、逆の手順で付け替えてください。

⑦ ActiveSleepシリーズ RA-C1/C2モデル・INTIME1000シリーズの取扱説明書に従って、手元スイッチホルダーが取り付けいていた側にマットレス止め（サイド）を取り付けてください。


8 手元スイッチの取り付け・取り外し方法

8-2.手元スイッチコードの配線


警告

手元スイッチコードは正しく配線してください。断線や破損のおそれがあります。電源コードが破損すると感電・火災のおそれがあります。

- ベッドの可動部 (背あげリンク・膝あげリンク) にはさまれたり、掛かったりしないように配線してください。
- 脚座やキャスターなどで踏まないように配線してください。

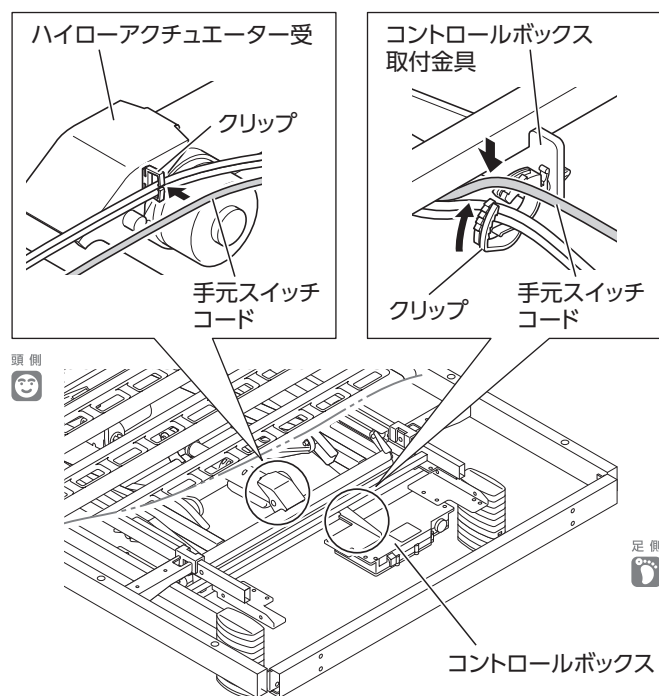

- ① コントロールボックス取付金具に付いているクリップに手元スイッチのコードを取り付けてください。
- ② ハイローアクチュエーター受の横に付いているクリップに手元スイッチのコードを取り付けてください。 

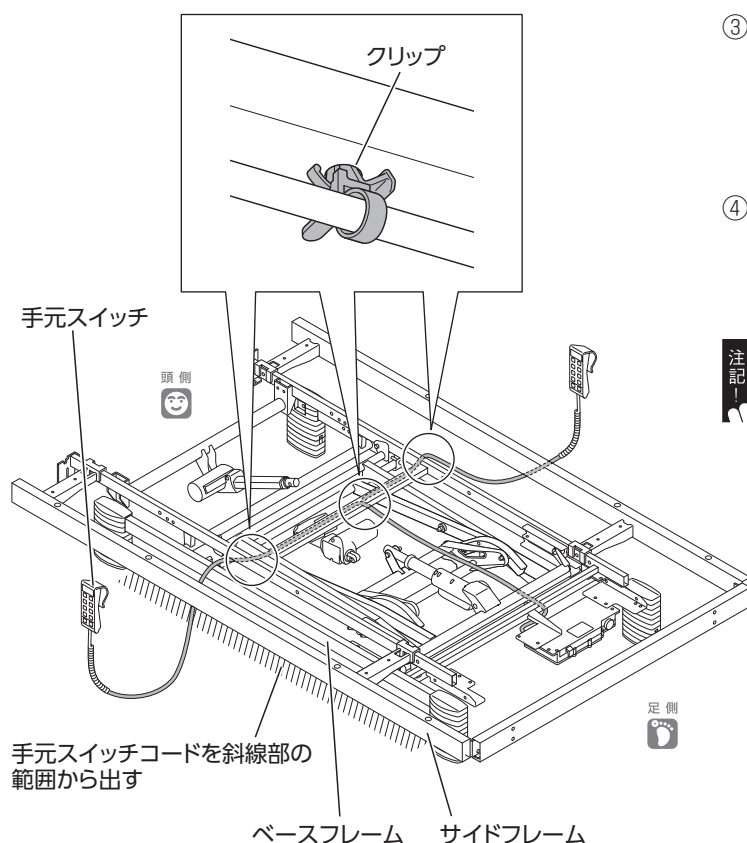

- ③ 手元スイッチを使用する向きに合わせて左右を決め、左図を参照して、手元スイッチコードに締結されているクリップを、フレームの穴に留めてください。(2ヶ所)
- ④ 手元スイッチコードをベースフレームの上側とサイドフレームの下側 (斜線部) を通して、ベッドの外側に出してください。



手元スイッチの取付後、「**9**取付後の点検」に従って点検を行ってください。
(P 24・25ページ)

9 取付後の点検

■手元スイッチの取り付けが終わりましたら、ベッドに人が乗っていないことを確認の上、下記のチェックシートで点検してください。（㊦ 24・25ページをコピーしてお使いください）

- 定期点検のときも、このチェックシートを使用してください。
- 異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテクノコールセンター（㊦ 26ページ）までお問い合わせください。

^{けい こく} 警告

取付後は点検を行ってください。取り付けが不十分な状態で使用すると、けがや故障のおそれがあります。

^{ちゅう い} 注意

点検作業をしているときに異常音や振動が生じた場合は、すぐにベッドの使用を中止し、パラテクノコールセンター（㊦ 26ページ）までご連絡ください。



チェックシート

1 手元スイッチコードの確認

- 手元スイッチコードに締結されているクリップをフレームに留めていますか？（2ヶ所）
- ベースフレームの上側とサイドフレームの下側を通っていますか？
- ベッドの可動部に接触していませんか？
- 脚座やキャスターなどで踏んでいませんか？

☐ はい

☐ いいえ → 23ページ

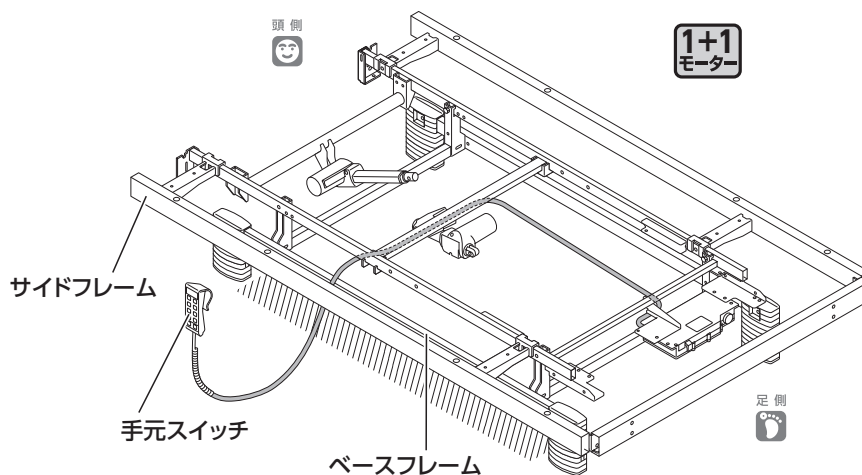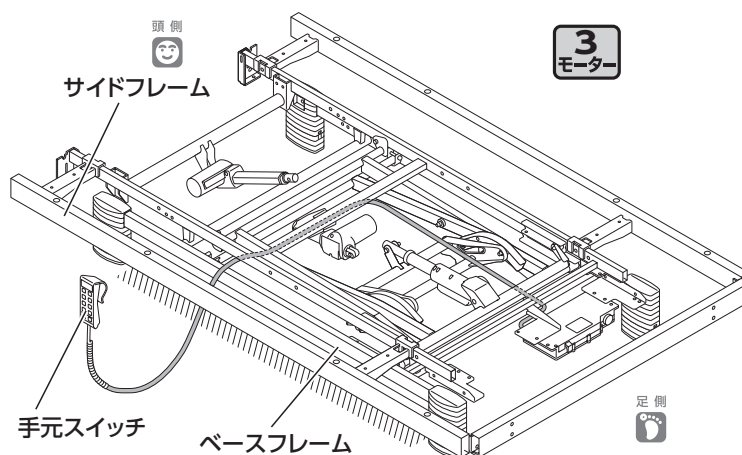

2 手元スイッチコードの傷

手元スイッチコードに傷などありませんか？

☐ はい

☐ いいえ ➡ パラテクノコールセンター（☎ 26ページ）へ連絡

3 手元スイッチの確認

ベッドの電源プラグをコンセントに差し込むと手元スイッチの電源ランプが緑色に点灯しますか？

☐ はい

☐ いいえ ➡ 6ページ

4 操作時の確認

手元スイッチで「らくらくモーション」「背あげ」「膝あげ」「高さ調節」の操作を最大まで行ったとき、以下の異常がありませんか？

☐ 異常ない

☐ 異常音が出る ➡ パラテクノコールセンター（☎ 26ページ）へ連絡

※場所や状態によってはお客様で注油を行うことができます。

☐ 動作しない（電源ランプが点滅する） ➡ 19・20ページ

☐ ベッドが家具などに当たる ➡ ベッドを移動するか、障害物を取り除いてください。

5 手元スイッチの傷や破損

手元スイッチに、傷や破損がありませんか？

☐ ない

☐ ある ➡ パラテクノコールセンター（☎ 26ページ）へ連絡

1.保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2.手元スイッチの修理を依頼されるとき

手元スイッチの修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

保証期間内のとき

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3.アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンター（下記参照）までお問い合わせください。

調整・点検が必要な場合は、パラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター  **0120-54-8639**

【受付時間】 平日8:00～18:00 / 土・日・祝日9:00～17:00（年始は休業いたします）

■【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

<パラマウントベッド株式会社 直営店>

眠りギャラリー TOKYO	〒104-0031	東京都中央区京橋1丁目6番1号三井住友海上テコビル1階	☎(03)5250-1515(代)
眠りギャラリー SAPPORO	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)219-8800(代)
眠りギャラリー NAGOYA	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-6800(代)
眠りギャラリー KITTE 大阪店	〒530-0001	大阪市北区梅田3丁目2番2号 KITTE 大阪 3F	☎(06)6485-7633(代)
眠りギャラリー FUKUOKA	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-0666(代)

<パラマウントベッド 株式会社>

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100(代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
高松営業所	〒761-8031	高松市郷東町223番1	☎(087)881-8900(代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)

保証書

品名	オプション用手元スイッチ (ActiveSleepシリーズ RA-C1/C2モデル・ INTIME1000シリーズベッド専用)	品番	RC-1021 RC-1821
保証期間	1年間		
★お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所	〒□□□ - □□□□ ☎ ()	
★販売店	店名		
	住所	☎ ()	

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規定

- 保証期間内(お買い上げの日より1年間)に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - (1)使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - (2)弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - (3)お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - (4)火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - (5)保証書のご提示がない場合
 - (6)本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - (7)字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

修理実施日	修 理 内 容	担当者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の中の「アフターサービス」をご覧ください。

パラマウントベッド株式会社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号